



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

地址: 广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号佳德科技园C栋5层
电话: 020-32382095 邮箱: sales@sonostar.net 网址: www.sonostarmed.com

索诺星
SonoStar

怕痛? 怕尴尬? 怕恢复期?
给您一杯咖啡的时间, 悄悄告别难言之隐。

E8 痔疮电解治疗仪



✓ 无疼痛

✓ 无创面

✓ 不出血



✓ 不手术

✓ 不麻醉

✓ 费用低



产品介绍

痔疮电解疗法是在祖国医学枯痔钉疗法的理论体系和微电流电化学法理论的基础上加以改进、研发的一项无需麻醉无痛无创调治内痔及混合痔的一种特色治疗方法。适用于湿热下注、气滞血淤、脾虚气陷、阴虚肠燥型等人群，通过智能微电流理疗设备，连接配套特制痔漏探针（粤穗械备20250319）在微电流电场的作用下，快速导致痔血管团闭塞，至痔体萎缩、制止出血的效果，这种无痛无创无需麻醉的特色疗法，真正实现了“无创断痔”的无痛新理念

工作原理

查检过程 >>>>>




指诊查检，
明确内痔
位置及形
态大小




痔漏探针探查痔疮方位
及深度

调治过程 >>>>>

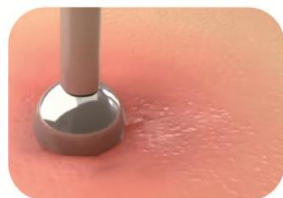

以特制肛
门镜肛检
锁定内痔
位置

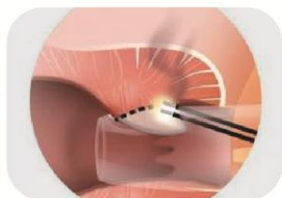


将痔漏探针接触痔疮底部，
根据患者耐受程度调整电流
(强度为 4~16 毫安)，在微
电流电场的作用下，短时间
内促使大量负离子释放，使
局部组织水解产生气泡导致
痔血管团闭塞，全程无出血，
至痔体萎缩调治结束。


技术核心




1 患者侧卧在左侧，臀部下放置盐
水贴片。

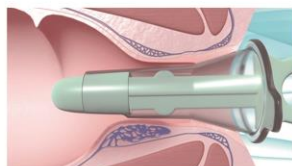


2 插入直肠镜以到达齿状线上方的
痔疮底部，不需要麻醉。

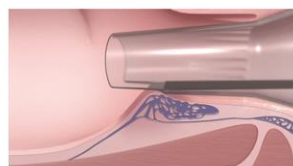


3 插入痔漏探头并轻轻放在痔疮
的底部。

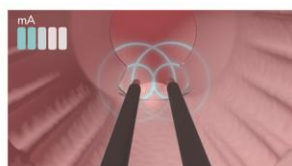

4 探针产生16mA 的微电流，无疼
痛感。

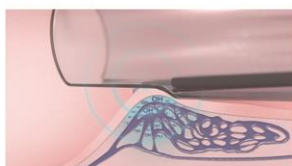

5 刺激痔疮中的化学反应，创建自
负额积聚的碱以封闭供血性静
脉曲张血管。

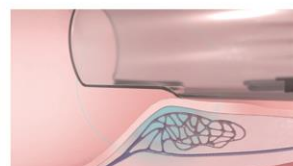

6 缺乏血液供应的痔疮会相应地
萎缩，效果持续长达 4 周。

产品优势



安全

检查调治过程中无需麻
醉，切割。使用一次性
特制痔漏探针耗材



见效快

检查调治过程仅需
30 分钟左右



体验感


检查调治体验感舒适，
调理过程无痛无创、无
需打针吃药换药




便捷

调治后，可立即恢复正
常生活，全程操作简单、
方便、宜上手

疗法流程

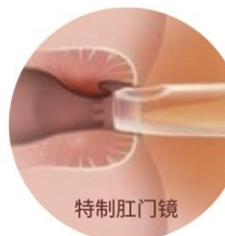


以特制肛门
镜肛检锁定
内痔位置

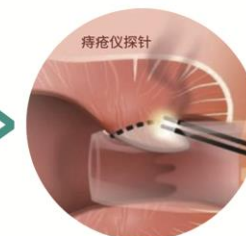


探针接触痔疮底部粘
膜，根据患者耐受程
度调整微电流，患处
有氢气产生、蛋白质
变性使组织变白，痔
疮迅速缩小



微电流刺激痔疮电解痔核
中水分子分解成 H⁺，水和
OH⁻，肿状态迅速减轻

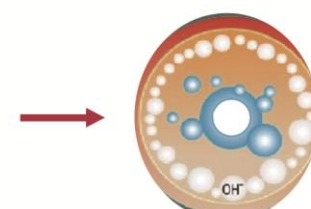

H⁺ 转化成氢 (H₂)，以泡沫
方式释放；OH⁻ 形成碱性
环境，使蛋白质变性

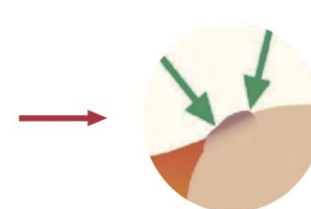

经过 10~15 天，痔疮萎
缩，最后自行吸收

案例展示



调治前



调治后



调治前



调治后